

FRANÇAIS - Contact : Seemann Technologies GmbH > Panoramastrasse 20 > 78583 Böttingen
info@seemann-technologies.com > www.seemann-technologies.com > Tél. : 07429/9300388

1 Domaine d'application

Pincettes bipolaires stériles à usage unique. Voir n° réf. ci-dessous.

Tension nominale maximale de l'accessoire :

Désignation	N° réf.	U _{max}
Pincettes bipolaires à usage unique	ST-99-300 -	0,5 kVp
	ST-99-399	
	ST-99-300SL -	
	ST-99-399SL	
	ST-99-300CAB -	
	ST-99-399CAB	
	ST-99-300CAB-SL	
	- ST-99-399CAB-SL	
	ST-99-300ERB -	
	ST-99-399ERB	
	ST-99-300ERB-SL	
	- ST-99-399ERB-SL	
	ST-99-300MAR -	
	ST-99-399MAR	
	ST-99-300MAR-SL - ST-99-399MAR-SL	

Dépend du générateur HF utilisé. Pour toute question, veuillez vous adresser au fabricant.

En cas de combinaison avec un autre accessoire HF, la tension nominale maximale de l'accessoire correspond à la plus petite tension nominale de l'accessoire.

En principe, le réglage de puissance efficace le plus faible devrait être utilisé pour une procédure déterminée.

2 Utilisation conforme

Les pincettes bipolaires doivent uniquement être utilisées par un personnel médical formé à ce dispositif.

Les pincettes bipolaires sont prévues pour la chirurgie ouverte et servent à la manipulation et à la coagulation de tissus biologiques. Les pinces ne sont pas destinées à entrer en contact direct avec le cœur ou le système circulatoire central ou le système nerveux central. Les pincettes bipolaires sont reliées à la sortie bipolaire du générateur électrochirurgical via un câble HF adapté. L'activation est effectuée au moyen d'un interrupteur à pédale. Il est recommandé d'utiliser un système d'évacuation des fumées.

3 Consigne de sécurité



AVERTISSEMENT !

La tension nominale maximale des pincettes bipolaires est indiquée dans la présente notice d'utilisation, sur l'étiquette ou dans le catalogue produits actuel.

En cas de doute, contacter le fabricant.

Avant chaque utilisation, un contrôle visuel et fonctionnel doit être effectué (voir Point 5 « Contrôle visuel et fonctionnel »). Il faut s'assurer que la pincette bipolaire est bien insérée dans le câble HF adapté. Il faut alors procéder avec prudence afin d'éviter d'endommager la pincette bipolaire et/ou de blesser le patient ou le personnel chirurgical. Les pointes peuvent être endommagées par une application excessive de force. Tant que la

pincette bipolaire reste en contact avec des objets métalliques et/ou des optiques, l'activation est interdite afin d'éviter des brûlures.

Une isolation endommagée peut provoquer un court-circuit. En cas de court-circuit, l'utilisateur ou le patient peut être sérieusement brûlé. N'activer les pincettes bipolaires que lorsque les surfaces de contact se trouvent dans le champ de vision et qu'elles ne touchent aucun autre instrument ni objet métallique.



Il faut veiller à l'absence de substance combustible et/ou de tissu humide dans l'environnement immédiat pendant toute l'utilisation afin d'éviter un risque d'explosion ou de surcharge électrique.

Une fois le courant électrochirurgical coupé, la pointe de l'instrument peut être encore chaude et causer des brûlures.

L'utilisation de courant HF peut provoquer l'endommagement des pacemakers et des défibrillateurs cardiaques implantables. Par conséquent, les patients concernés doivent consulter un cardiologue avant l'intervention.

L'utilisation de ces pincettes en combinaison avec des appareils de radiofréquence est interdite !

4 Retraitement

INTERDIT - DISPOSITIF STÉRILE À USAGE UNIQUE



5 Contrôle visuel et fonctionnel



Avant chaque utilisation, l'absence de points de pression ou de dommages sur l'isolation des pincettes bipolaires doit être contrôlée. Avant l'utilisation, l'absence de dommages, les éléments manquants ou lâches, les arêtes vives ainsi que les surfaces rugueuses de la pincette bipolaire et de son accessoire doivent être contrôlés. Les pincettes bipolaires endommagées, avec des parties manquantes ou lâches, avec des points de pression ou une isolation endommagée ne doivent pas être utilisées.

6 Réparation et modification

Les pincettes bipolaires défectueuses ne doivent pas être réparées. Elles doivent être remplacées par de nouvelles pincettes bipolaires. Les modifications et les réparations décidées sans concertation sont strictement interdites et entraînent la perte de la garantie du fabricant.

7 Emballage, stockage, transport, manipulation


Les pincettes bipolaires doivent toujours être traitées avec le plus grand soin lors du transport et du stockage. Ceci s'applique en particulier aux pointes fines et aux autres endroits sensibles.

Veiller à ne pas endommager l'emballage lors du conditionnement.

Les produits sortis d'emballages endommagés ne sont plus stériles et ne doivent par conséquent plus être utilisés !

Conditions de transport :

Température ambiante :

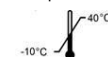

Humidité relative :



Conditions de stockage :

La durée d'utilisation indiquée pour les pincettes HF stériles n'est valable qu'en cas de stockage conforme.

Conditions de stockage pour les produits stériles :

- Dans un endroit sec
- À l'abri des poussières
- À l'abri de la lumière
- À l'abri des endommagements
- À l'abri des influences mécaniques
- À l'abri des variations extrêmes de température
- Séparé des produits non stériles
- Dans un endroit propre
- À l'abri de la vermine

8 Durabilité

3 ans à partir de la date de fabrication

9 Mise au rebut

L'élimination des pincettes bipolaires et du matériel d'emballage ainsi que de l'accessoire doit être effectuée selon les directives et réglementations locales en vigueur.

10 Retour

Les produits stériles à usage unique ne sont ni repris ni échangés.

11 Concernant cette notice d'utilisation

La notice d'utilisation doit être librement accessible à chaque utilisateur pendant la durée d'utilisation des pincettes bipolaires.

La société Seemann Technologies GmbH décline toute responsabilité et garantie pour les dommages ou les dommages consécutifs qui surviendraient en cas de non-respect de la présente notice d'utilisation.

Cette notice d'utilisation peut être téléchargée à tout moment sur le site www.seemann-technologies.com dans la zone « login ».

Pour toute question, veuillez appeler directement le +49 (0)7429 9300388 ou envoyer un courriel à info@seemann-technologies.com.



CE 0483




STERILE EO

Index : H

Dernière modification :
30.05.2022

Sous réserve de modifications techniques

FRANÇAIS - Contact : Seemann Technologies GmbH > Panoramastrasse 20 > 78583 Böttingen

 info@seemann-technologies.com > www.seemann-technologies.com > Tél. : 07429/9300388

12 Symboles utilisés :



Fabricant



Numéro de commande



Désignation de lot



Date de fabrication



À utiliser jusqu'au



Ne pas réutiliser



Ne pas restériliser



Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Produit sans latex



Plage de température de stockage



Limite d'humidité pour le stockage



Attention !



Consulter la notice



Conserver au sec



Protéger de la lumière du soleil



Marquage CE avec numéro de l'organisme notifié conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux



Dispositif médical

©2019, Seemann Technologies GmbH. Tous droits réservés. Tous les noms de société, les marques, les marques de service, les noms commerciaux, les noms de produits et les logos contenus dans ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs et doivent être traités en conséquence.